


HEDclip

- > Zugentlastung des Blutschlauchsystems
- > Mehr Bewegungsfreiheit für Ihre Patienten
- > Für eine sichere Dialyse




HEDclip - Mehr Sicherheit während der Dialyse

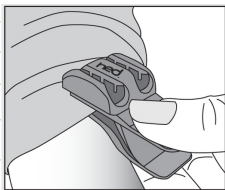


1. HEDclip anbringen

Den HEDclip durch Druck auf den hinteren Bereich öffnen und an die gewünschte Stelle klemmen. Es empfiehlt sich eine dickere Stoffstelle (Kleidung, Bettlaken) auszusuchen oder bei Bedarf den Stoff doppelt zu legen, um eine höhere Haltekraft zu erzielen.

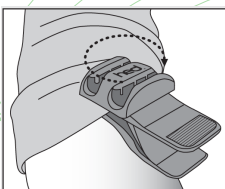


2. Schlauchhalterung anpassen

Den oberen Teil des HEDclip zur besseren Führung des Schlauchsystems drehen, so dass die Schlauchhalterungen parallel zu den Schläuchen verlaufen. Die Anbringung am Kleidungsstück nochmals überprüfen.

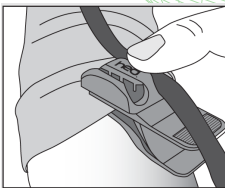

3. Blutschlachsystem einlegen

Sobald die Position des HEDclip richtig eingestellt ist, werden die beiden Schläuche nacheinander von oben in die Halterungen eingelegt. Zum Fixieren leichtes Druck mit dem Finger auf die Schläuche ausüben.

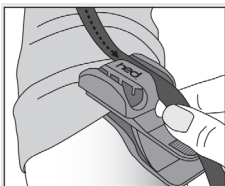

4. Blutschlachsystem anpassen

Falls notwendig können die Schläuche durch leichtes Ziehen im Führungssystem bewegt und so an die gewünschte Lage angepasst werden.

Durch die kleinen Stege im Inneren der Schlauchführung werden zu große Krafteinwirkungen auf die Kanüle verhindert.

Reinigung: Falls notwendig kann der HEDclip mit Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln oder Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Auch eine Reinigung bei Temperaturen bis 100° C ist möglich. Häufiges Reinigen bei hohen Temperaturen verkürzt die Lebenszeit des HEDclip.

Lagerung: Um lange Haltbarkeit zu garantieren, sollte der HEDclip ohne Belastung gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung kann die Lebensdauer reduzieren.

